

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

O- PAIR


Pyörätuolipyörä O-Pair on tarkoitettu mahdollistamaan pyörätuolissa istuvan ihmisen kulkemisen polkupyörällä. O-Pairissa matkustaja istuu istuimella pyörän etupuolella. Istuimessa on useita säätöjä, joiden avulla asiakas saadaan tuettua hyvään asentoon. Pyörässä on käsijarrut, vaihteet sekä polkemista helpottava apumoottori. Pyöräillessä on aina muistettava käyttää pyöräilykypärää.



Istuinosan leveyttä säädetään istuimen alla olevista ruuveista.

Selkänojan leveyttä säädetään istuimen takaa. Säätämisiin tarvittavat työkalut löytyvät takatelineen laatikosta.

Istuimessa on 5 pisteturvavyöt.

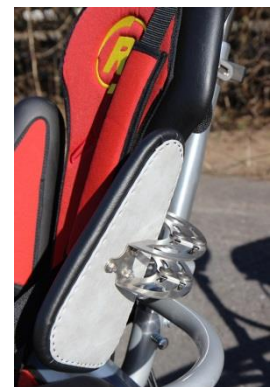

Jalkalaudan etäisyyttä säädettäessä löysää jalkalaudan varressa oleva mustapäinen ruuvi. Nostamalla varresta saat asetettua jalkalaudan haluamallesi etäisyydelle.



Virtakytkin ja **vaihteet** sijaitsevat oikeanpuoleisessa ohjausaisassa. Akkuvirta kytketään päälle ja pois on/off- painikkeesta. Pidemmän käyttötaun jälkeen akku ”herää” kun painat on/off- painiketta ja poljet muutaman metrin.

Akku sijaitsee pyörän takana sivulla olevassa laatikossa. Akkulaatikkoa ei normaalioloissa tarvitse avata.

Akun latausjohto säilytetään takatelineellä olevassa laatikossa. Latausjohto kiinnitetään akkulaatikon takaosaan.

Akun lataus kestää pidempään, jos käytät polkimia moottorin lisäksi. Muista ladata akku ja sammuttaa virta, kun lopetat polkemisen.



Seisontajarru sijaitsee vasemmanpuoleisessa ohjausaisassa. Purista jarrua ja paina metallinen klipsi jarrukahvan koloon.



Käyttöohjekirja löytyy takatelineen muovilaatikosta.

Polkemaan lähdeessä:

- tarkista renkaiden ilmanpaine
- seisontajarrua kannattaa hyödyntää pyörään siirtymisten ajaksi
- **erityisesti akkuvirtaa hyödynnettäessä käännökset tulee tehdä laajoina kaarina**
- pyörä tulee säilyttää lukittuna

Ethän anna pyörää käyttöön henkilölle, joka ei pysty noudattamaan turvallisen pyöräilyn periaatteita. Liikuntapalvelukeskus ei vakuuta välineen käyttäjiä.

Tekniset tiedot:

Rungon korkeus: 54 cm

Pyörän paino: noin 40 kg

Pyörän pituus: 197 cm

Pyörän leveys: 70 cm

Maksimikuormitus: 220 kg

O-Pairia voi vuokrata yksityiseen käyttöön tai esim. palvelukeskusten, laitosten ym. käyttöön. Varaukset ja lisätiedustelut osoitteesta liikunta.valinelainaukset@turku.fi tai liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6222, liikuntas sihteeri p. 050 554 6217.