

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE MAASTOPYÖRÄTUOLI (Hippocampe)



Hippocampe on kolmirenkainen vapaa-ajan monitoimituoli. Sen avulla voi liikkua avustettuna (työnnettynä ja/ tai vedettynä) tai itse kelaten esimerkiksi maastossa ja uimarannalla.

Tuoli menee osina pieneen tilaan ja on koottavissa ilman työkaluja. Hippocampessa on tukevan istuimen lisäksi käsinojalliset sivutuet, niskatuki ja hyvät turvavyöt.

HIPPOCAMPEN PURKAMINEN OSIIN:



Työntökahva irtoaa painamalla molempien puolien painonapit alas samanaikaisesti ja vetämällä kahva pois. Painonapit painetaan sormella, ei apuvälineillä!



Renkaat irtoavat, kun painetaan akselissa olevaa painonappia.

Löysää soljet penkin vierestä, käsinojen alaosasta ja työnnä selkänoja alas.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN OSIA TAI SOLKIA TUOLISTA!!!!



Niskatuki on säädettävissä.



Koko kasaan taitettuna:
pituus 1,30
leveys 65cm
korkeus 80cm



Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että Hippocampe on huolellisesti koottu, kaikki osat ovat hyvin kiinni ja painonapit ylös ponnahtaneena.

Jalkalaudalle ei tule astua tuoliin siirryttäessä tai siitä pois noustessa. Se ei kestä suurta painoa.

Tuolin valkoinen etupyörä on alipainerengas ja sen tulee olla löysä. Liian täydeksi pumpattuna se ei mahdu pyörimään lokasuojan alla.

Talvella eturenkaan alle on saatavilla suksi, joka mahdollistaa liikkumisen helpommin kevyessä lumessa.

Maastopyörätuolia ei ole tarkoitettu lasten leikkeihin! Käytetään aikuisten valvonnassa.